

Instructions pour les échantillons

Sang total périphérique


Utiliser uniquement les tubes fournis à l'intérieur de la boîte de collecte et d'expédition de FoundationOne®Liquid CDx. **D'autres tubes ne seront pas acceptés.**



Présentation de la manipulation des échantillons

L'analyse précise de l'ADN circulant nécessite une technique spécifique de collecte et une manipulation appropriées de l'échantillon. **Le non-respect de ces instructions peut compromettre les résultats** en diluant l'ADN tumoral circulant avec de l'ADN provenant de la lyse des globules blancs.

- 1 Vérifier les tubes spéciaux fournis dans la boîte de collecte et d'expédition de FoundationOne®Liquid CDx pour vous assurer que le liquide est clair et sans trouble ni cristaux.
- 2 Etiquetter chaque tube avec les étiquettes fournies indiquant **la date de prélèvement et les deux identifiants uniques pour le patient** (numéro d'identification ou customer order number de la commande et date de naissance)
- 3 Prélever deux tubes de sang total (8,5 ml par tube)
 - Éviter les reflux: les tubes contiennent des additifs chimiques et il est important d'éviter les reflux lors du prélèvement.
 - Recueillir l'échantillon par prise de sang conformément au CLSI H3-A6.¹
 - Remplir les tubes jusqu'au niveau indiqué (8,5 ml par tube).
- 4 Retirer le tube de l'adaptateur et **mélanger immédiatement en le retournant doucement 8 à 10 fois**. Un mélange inadéquat ou tardif peut entraîner des résultats erronés. Il faut faire un tour complet du poignet, à 180 degrés, avec retour selon la figure ci-dessous.

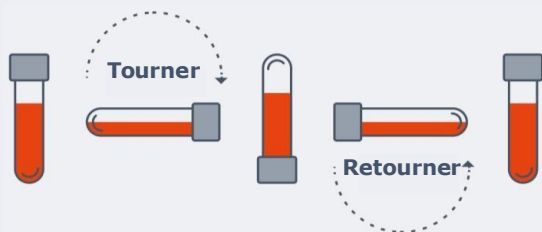

ATTENTION : NE PAS SECOUER LES TUBES
Effectuer les rotations comme indiquées sur le schéma

- 5 Placer les 2 tubes, le formulaire de demande de test (TRF) correspondant et la feuille de confirmation du diagnostic dans le kit d'expédition de FoundationOne®Liquid CDx.
 - Vérifier que chaque tube est **étiqueté avec les étiquettes fournies** en indiquant la date de collecte et les deux identifiants uniques du patient (numéro d'identification ou customer order number de la commande et date de naissance).
- 6 Organiser l'enlèvement par le transporteur le jour même de la collecte.

**La température est importante. Conserver à température ambiante (4-35 °C).
NE PAS CONGELER.**

POUR LE SUIVI DE VOS TESTS

Service Client Roche

TEL : 01 47 61 61 70

france.foundationmedicine@roche.com

POUR TOUTE QUESTION SCIENTIFIQUE

Information Médicale Roche

TEL : 01 47 61 47 61

paris.imp@roche.com

Références

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. H3-A6, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture; approved standard-sixth edition.

Pour plus d'informations sur FoundationOne Liquid CDx, veuillez consulter les spécifications techniques.

Foundation Medicine® et FoundationOne® sont des marques déposées de Foundation Medicine®, Inc. Roche est le distributeur agréé des produits Foundation Medicine® en dehors des États-Unis.

M-FR-00003453-v1.0 établi en février 2021